

Reinigungsanleitung

Allgemeines:

- **Metallteile** (RAL 7035 / RAL 9005 / RAL 9006 oder Chrom):
 - Tragen Sie Bleichmittel mit 9,6 % aktivem Chlor auf, verwenden Sie ein Reinigungsmittel vom Typ Vigor, verdünnt auf 5 %, oder Produkte vom Typ ANIOS (Tests an lackierten Metallen wurden 2007 vom FCBA (Französisches Institut für Technologie in den Bereichen Forst- und Möbelsektor) gemäß den technischen Anforderungen 25.SC.01 und 22.NFS.01 durchgeführt).
 - Reinigen Sie mit einem Einweg-Tuch.
 - Spülen Sie gründlich ab.
 - Trocknen Sie die Teile nach der Reinigung gründlich.
- **Kunststoffteile:**
 - Reinigen und waschen Sie mit einem feuchten Einweg-Tuch.
- **Bezüge:**
 - Verwenden Sie warmes Seifenwasser oder Desinfektionsmittel vom Typ ANIOS (eine Reihe von ANIOS-Produkten wurde auf beschichteten Bezügen getestet, ohne dass die Qualität der Bezüge beeinträchtigt wurde: ANIOS DDSH, ANIOS TSA, SURFANIOS und ANIOSURF).
 - Reinigen Sie mit einem Einweg-Tuch, wobei besonders auf folgende Teile des Sitzes geachtet werden sollte: Kopfstütze, Sitzfläche und insbesondere die Vorderseite der Sitzfläche, die mit den Beinen in Kontakt kommt. Diese Bereiche sind am stärksten von der Entplastifizierung der beschichteten Bezüge bei unsachgemäßer Reinigung betroffen.
 - Spülen und trocknen Sie die Bezüge nach der Reinigung.
- **Dampfreinigung:**
 - Die Dampfreinigung ist mit allen Navailles-Bezügen kompatibel.

Liste von Produkten, die unter keinen Umständen verwendet werden dürfen:

- Unverdünnter Alkohol und/oder Aceton
- Alle Lösungsmittel und Reinigungsmittel
- Scheuernde Reinigungsprodukte
- Perchlorethylen
- Alle Arten von Wachsen
- Trichlorethylen

Besondere Fälle:

- **Tinte, hartnäckige Flecken:**
 - Bei der Reinigung mit Seifenwasser, verdünntem Alkohol (30 % Alkohol, 70 % Wasser) oder verdünntem Aceton (10 % Aceton, 90 % Wasser)

können Kugelschreiberflecken weniger sichtbar gemacht, aber nicht vollständig entfernt werden. Spülen Sie mit sauberem Wasser nach.

- **Eosin und medizinische Produkte:**
 - Waschen Sie die betroffenen Stellen so schnell wie möglich mit Seifenwasser. Bei hartnäckigen Flecken können Sie Bleichmittel oder eine 10 %ige Alkohollösung verwenden, jedoch bleibt die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass der Fleck sichtbar bleibt. Spülen Sie mit sauberem Wasser nach.
 - Die Farbstoffe einiger medizinischer Produkte können in Materialien eindringen und bleibende Flecken hinterlassen, die durch Reinigung verblassen. Krankenhausdesinfektionsmittel der ANIOS-Produktreihe hinterlassen keine Flecken auf Bezügen.
- **Lebensmittel, Ketchup, Schokolade:**
 - Flecken können durch Waschen mit Seifenwasser entfernt werden. Je nach Farbe des Stoffes (insbesondere bei hellen und einfarbigen Stoffen) kann ein Fleckenring zurückbleiben.
 - Eine schnelle Reinigung der Flecken wird empfohlen.
 - Bei hartnäckigen Flecken können Bleichmittel oder eine 10 %ige Alkohollösung verwendet werden, um den Fleckenring zu reduzieren. Spülen Sie anschließend mit sauberem Wasser nach.